

## Detector de preñez de marrana

[Ver producto](#)



**S/30.00 (¡oferta!)**

- Tome la orina del recipiente, saque la placa de prueba y la paja de la bolsa de aluminio y chupe la orina a través de la paja.
- Coloque 3-4 gotas en el orificio redondo de muestreo (S) de la placa de ensayo. En este momento, la orina se mueve lentamente hacia el otro extremo del papel de prueba bajo la acción del sifón.
- Observe los resultados en 10 minutos desde el panel de la ventana hasta una o dos líneas rojas.  
¡Haz tu pedido!

[Añadir al carrito](#)



## Descripción

Detector de preñez de [marrana](#) marca Omabeta de origen chino que ofrece resultado rápida y precisa.

¿Cómo utilizar?

- Tome la orina del recipiente, saque la placa de prueba y la paja de la bolsa de aluminio y chupe la orina a través de la paja.
- Coloque 3-4 gotas en el orificio redondo de muestreo (S) de la placa de ensayo. En este momento, la orina se mueve lentamente hacia el otro extremo del papel de prueba bajo la acción del sifón.
- Observe los resultados en 10 minutos desde el panel de la ventana hasta una o dos líneas rojas.

Envíos a todo [Perú](#).

Categoría: [CERDOS](#)

Etiquetas: [preñez](#), [prueba](#)